



Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS

POP N. 011 Versão 4	RECOMENDAÇÕES DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - LIMPEZA DO OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO
---	--

Data de elaboração: 02/04/2020	Elaborado por: Priscila Sanches Aquino de Oliveira – Enfermeira Sebastião Alves de Souza Filho – Médico
--	---

Data de revisão: 03/05/2022	Aprovado por: Rita de Cássia Godinho Guimarães Reis – Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
------------------------------------	--

1. Objetivos

- Realizar a limpeza do oxímetro

2. Local de Utilização

- Consultórios e salas de procedimento da UBS

3. Responsáveis

- Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem

4. Materiais necessários

- Álcool 70%
- Gaze ou algodão
- Oxímetro de pulso portátil

5. Descrição do Procedimento

- Desligue o oxímetro de pulso e retire as pilhas do compartimento da bateria.
- Friccionar a superfície exterior com gaze ou algodão umedecido com álcool 70%.
- Friccionar a parte interna com gaze ou algodão umedecido com álcool 70%.
- Evitar o uso de bijuterias, jóias e relógios durante a execução do trabalho.
- Nunca mergulhe qualquer parte do equipamento em líquido e nunca utilize materiais abrasivos ou produtos de limpeza erosivos (acetona ou produtos à base de acetona).

Condições de manutenção e armazenamento:

- Substitua as pilhas periodicamente quando a luz indicadora de bateria estiver acesa.
- Limpar a superfície do oxímetro portátil antes de utilizá-lo para o diagnóstico de pacientes.
- Remova as pilhas caso o oxímetro não seja utilizado por um longo período de tempo.
- Manter o oxímetro em local fresco e seco.

6. Fatores de risco

- NÃO MERGULHE QUALQUER PARTE DO EQUIPAMENTO EM LÍQUIDO E NUNCA UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS OU PRODUTOS DE LIMPEZA EROSIVOS (ACETONA OU AFINS).

7. Referências

- Manual do fabricante.